

Bu broşürü size veren müessese:

Bu enformasyonu veren:

sayfanın arka-sında her gözün alâmeti
farikası olarak bir yıldızı vardır



**F. AD. MÜLLER SÖHNE
WIESBADEN (RHEIN)**
Suni Göz Enstitüsü

ALÂMETİ FARİKALAR

Taunusstrasse 44, D-65183 Wiesbaden, GERMANY
Phone +49 (0)611-524864 Fax +49 (0)611-527285
E-mail info@glasauge.de Web www.glasauge.de
Telegramm-Adresse Augenmüller

Wiesbadendeki dünyanın en büyük enstitüsü olan müessesemiz bütün sene boyunca açıktır. Bilgi almak için evelden randevu alınmalıdır. Suni gözlerin direkt uyumunu sağlamak amacı ile her sene yurt içi ve dışında birçok şehre uğramaktayız. Lütfen seyahat planımızı isteyin.

Bütün mektuplarınızı ve adres değişikliklerini sadece Wiesbaden yöneltin.

DİKKAT:



İsim ve alâmeti farikaları dikkatle izleyin.
F. AD. MÜLLER SÖHNE, WIESBADEN (Rhein)

**Camdan yapılmış yapay
gözlerin bakımı ve
ihtimamı ile ilgili talimat**

BONN ŞEHRİNDEKİ ALMAN YAPAY GÖZLER-ENSTİTÜLERİ
TESCİL EDİLMİŞ CEMİYETİ

Tedavi edilen sayın hasta:

Camdan yapılmış yapay gözler, tabiata uygun olarak taklit edilmiş, olduklarından dolayı, farkedilemeyecek şekilde taşınabilir ve zorluk yaratmayacak şekilde yerine otururlar ve böylece emin bir görünüş yaratırlar. Fakat daima dikkat etmeniz gereken husus şudur: Yapay gözünüzü iyi bir şekilde taşıyabilmeniz için gerekli şart, yapay gözün doğru bir şekilde bakımının yapılması ve ihtimamının gösterilmesidir. Aşağıdaki talimata tamamen riayet ettiğiniz takdirde bu bakım ve ihtimam gayet basit olur. Bu bilgileri lütfen dikkatle okuyunuz. Anlamadığınız bir durum olursa, o zaman, yapay gözünü satın almış olduğunuz müessesedeki göz teknisyenine danışınız. Bu teknisyen size memnuniyetle yardım eder.

Yapay gözünüzün hususiyetleri:

Yapay gözünüz, sizin kendi göz çukurunuzun ölçüsüne uygun olarak imal edilmiş özel bir yapay gözdür. Malzeme olarak Kryolit camı kullanılmıştır. Kalitesi yüksek olan bu özel cam, Almanya'da cam göz imalatında 1850 senesinden beri kullanılmakta olup, bütün dünyada sadece iki cam fabrikasında bugüne kadar gizli tutulan bir sistemle imal edilmektedir. Eskiden olduğu gibi, bugün dahi Kryolit camı, içinde kurşun olmadığı için, yapay göz sahasında büyük faydalar sağlamaktadır. Bu hususiyet, yapay gözün, şiddetli tahriş yapan gözyaşına yüksek bir mukavemet gösteren üst yüzeyi dolayısıyla, kaygan zara en iyi bir şekilde uygunluk sağlar.

Camdan yapılmış yapay gözler, içi boş veya çok ince yapay zarlardan imal edilirler. Hangi yapay gözün sizin durumunuza uygun olacağını sizin kendi göz teknisyeniniz, göz çukurunuzun bünyesine göre, tayin eder. Çalışırken, boş zamanınızda ve spor yaparken yapay gözünüz size hiç bir engel teşkil etmez. Meselâ, yapay gözünüz takılı olarak yüzmeğe dahi gidebilirsiniz. Su her zaman temiz olamayacağı için, yüzerken koruyucu gözlük takılması tavsiye edilir.

Yapay gözlerin bakım ve ihtimamı:

Yapay gözler her gün en azından bir defa temizlenmelidir. Temizlik için sadece berrak ve ılık su kullanınız. Sıcak veya soğuk su asla kullanılmamalıdır, zira fazla hararet farkı malzemenin dayanıklılığını bozabilir. Yapay gözleri, tahriş eden sıvılarla dahi yıkamayınız. Yapay gözlerin üst yüzünü sert cisimlerle silmeyiniz. Çıkmayan kirler olduğu takdirde yapay gözü takriben 10 dakika kadar su içinde yumuşatınız. Bunun için de tuzlu su kullanılması tavsiye edilir (bir çay kaşığı dolusu mutfak tuzu bir litre kaynatılmış suda veya damıtık suda eritilir). Bundan başka, bakteri öldüren sıvılar da temizlik için kullanılabilirler. Bu hususta göz teknisyeninize danışabilirsiniz. Yapay gözü, tuzlu eriyik içinde yumuşadıktan sonra iyice yıkayınız ve sonra selülozlu bir madde ile kurutunuz. Bunu unutmayınız. Yapay gözü, takmadığınız zaman, kapalı bir kutu içinde kuru olarak muhafaza ediniz.

Lütfen dikkat ediniz: Yapay göz, prensip olarak su içinde muhafaza edilmemelidir.

Yapay gözün gece ve gündüz takılıp takılmayacağı hakkında sorulacak sorunun cevabı, muhakkak surette göz teknisyeniniz ile konuştuktan sonra, duruma göre verilmelidir.

Yapay gözü yerine oturtmak:

Lütfen dikkat ediniz: Yapay gözünüzün herhangi bir hasara uğramaması için yapay göz takılırken veya çıkarılırken yumuşak bir örtü veya bez üstünde bu iş yapılmalıdır. Lavaboda, fayans veya taş zemin üzerinde çok dikkat edilmesi gerekir.

Yapay göz, takılmadan önce iyice temizlenmelidir. Takmayı kolaylaştırmak için yapay göz her seferinde daha evvel biraz nemlendirilmelidir.

Lütfen dikkat ediniz: Normal yapay gözlerde kısa taraf burnu gösterir (şemaya bakınız). Fakat bu, kaide demek değildir. Çünkü birçok yapay gözler, bu şemada gösterilenlerden başka bir şekildedirler.

Yapay gözü takmak için evvelâ üst gözkapağı yukarıya kaldırılır ve yapay göz bunun altına itilir ve bu durumda sıkıca tutulur. Alt gözkapağını hafifçe alt tarafa çekince yapay göz, alt gözkapağının altına, tam yerine oturur. İcap ederse, göze parmakla hafifçe bastırmak suretiyle yapay göz, yerine iyice yerleştirilir ve böylece içeride kalmış olması muhtemel hava dışarıya çıkar. Yapay gözünüzün takılmasında zorlukla karşılaşırsanız, yapay gözün imal edilmesinde bu hususu göz teknisyeniniz size özel olarak tarif edecektir.


Yapay gözün çıkarılması:

Yapay gözü çıkarırken lütfen daima bir yumuşak örtü veya bez üstünde bu işi yapınız. Böylece, yapay göz yere düştüğü takdirde hiç bir hasara uğramaz.

Yapay göz çıkarılırken genel olarak yukarıya doğru bakınız. Yapay gözün alt kenarı serbest oluncaya kadar alt göz kapağınızı aşağıya doğru bastırınız. Bundan sonra işaret parmağınızın ucunu, yapay gözün alt kenarına itiniz ve orta parmakla yapay gözü, göz çukurundan aşağıya doğru çekip çıkarmak için tutunuz. İcap ederse yapay gözü başparmak ve işaret parmağı ile de çıkarabilirsiniz.

Olağanüstü hallerde yapay göz özel bir aletle (Meselâ bir çengel veya emici bir aletle) çıkarılır. Göz teknisyeniniz size bu hususta özel olarak tavsiyede bulunur.

Lütfen dikkat ediniz: Gözünüzü oğuşturmak veya silmek isterseniz, o zaman bu işi daima burnun istikametine doğru yapınız. Aksi istikamette oğuşturursanız – bilhassa alt gözkapağının üzerinde – o zaman yapay göz dönebilir veya dışarıya çıkabilir.

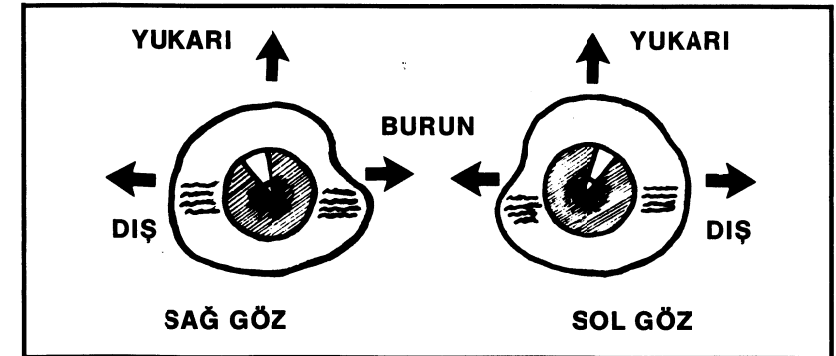

Camdan yapılmış yapay gözün şema halinde gösterilmesi

Yapay gözünüzün kullanılma müddeti:

Yapay gözün yıpranması bir çok faktörlere bağlıdır. Meselâ, çevrenin tesiri, göz çukurunun bünyesi, gözyaşı ifraz şiddeti, göz kapağının yeteri kadar kapanmaması, vs. gibi.

Her yapay göz, gözyaşının tahrip edici tesiri yüzünden tabii olarak yıpranır. Kullanılan çok dayanıklı malzeme dolayısıyla yapay gözün kullanılma süresi oldukça uzundur. **Bu süre ortalama olarak 1 senedir.** Fakat yapay göz kullanan kimseye çevrenin rahatsızlıkları fazla tesir eğerse, o zaman yapay gözün kullanma süresi oldukça azalır.

Yıpranmış bir yapay göz, göz çukurunda rahatsızlıklara yol açar. Yapay gözün pürüzlenen üst yüzü, göz çukurunu şiddetli derecede tahriş edebilir. Yapay gözünüzü yenisi ile değiştirmek için görülen ilk işaret, fazla miktarda gözyaşının akmasıdır. Göz çukuru kızarır ve bu kızarmanın devam etmesi halinde gözyaşının koyulaşması ve sarımtırak olması mümkündür. Durum böyle olursa, iltihabın bütün göz çukuruna yayılmasını önlemek için göz doktoruna gidilmelidir.

Göz doktorunuz tarafından göz çukurunuzun devamlı surette kontrol edilmesi ve yapay gözünüzün göz teknisyeni tarafından yenisi ile değiştirilmesi, yapay gözünüzü zahmetsizce kullanmanızı sağlar.

En son olarak bilmeniz gereken bazı hususlar:

- Yapay gözünüz, sizin kendi göz çukuruza uyacak şekilde özel olarak imal edilmiştir. Buna rağmen, yapay gözünüzde herhangi bir değişiklik (düzeltme) yapılması gerekirse, o zaman **vakit geçirmeden** kendi göz teknisyeninize müracaat ediniz. Yapay gözde yapılacak olan bir düzeltme ancak, yapay göz 4 saatten fazla kullanılmamışsa mümkündür, aksi takdirde hiç bir düzeltme mümkün değildir.
- Yapay gözünüzün imal edilmesi için daima daha önceden bir randevu (gün) alınız.
- Hasar görmüş bir yapay gözün tamiri mümkün değildir.
- Yapay göz şayet kırılırsa, o zaman, mümkünse **bütün** kırılan parçaları toplayınız. Yeni imal edilecek olan yapay göz için bu parçalar esas alınacaktır.
- Yapay gözünüzün size en iyi bir şekilde yakışması için şahsen gelmeniz icap eder. Özel hallerde göz tenisyeniniz size tavsiyelerde bulunur.